

## Valplast®

### Eingliederungsanleitung

Jede neue Prothese sollte vor dem ersten Einsetzen für eine oder zwei Minuten in sehr heißes Leitungswasser gelegt werden. Sobald die Prothese aus dem Wasser genommen wurde, sollte sie auf eine Temperatur abkühlen, die für den Patienten angenehm ist. Dann erfolgt das Einsetzen, welches sich durch das Erwärmen und die daraus folgende höhere Flexibilität sehr einfach gestaltet.

Falls eine Klammer weiter abgebogen oder fester angedrückt werden muss, so kann diese Anpassung durch das Eintauchen des entsprechenden Abschnittes der Prothese für 1 Minute in sehr heißes Wasser durchgeführt werden. Sobald die Klammer aus dem Wasser genommen wird, kann sie dementsprechend aktiviert bzw. korrigiert werden.

Ihr Team von...

Busse Zahntechnik GmbH & Co. KG

